

**Wingmed W234 –
Epi Albuebandage –
Med nemt lukkesystem**

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at støtte og aflaste senerne omkring albuen.
- Produktet giver målrettet kompression via en trykpude, som reducerer belastningen på senefæsterne.
- Ortosen kan anvendes på både højre og venstre arm.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer og i korrekt størrelse.

Materialer

- **Tekstil:** Polyester og polyamid
- **Støtteelementer:** Kompressionspude (polstring) til lokal aflastning

Anvendelse

1. Placer albuebandagen omkring underarmen lige under albueleddet.
2. Sørg for, at trykpuden ligger over den ømme muskel- eller seneregion.
3. Stram bandagen ved hjælp af velcrolukningen, så den sidder fast men komfortabelt.
4. Justér trykket efter behov under aktivitet.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Tennisalbue (lateral epikondylitis)
- Golfalbue (medial epikondylitis)
- Overbelastning af sener i underarmen
- Smerter i albuen ved gentagne belastninger

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.
- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.

**Importør og Distributør:**

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu