

**Wingmed W318 –
Tommelfingerskinne**

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at immobilisere og stabilisere tommelfingeren.
- Skinnen indeholder en indvendig aluminiumsstøtte, som giver stabilisering af tommelfingeren.
- Produktet kan justeres omkring håndleddet ved hjælp af velcrolukning.

Materialer

- **Tekstil:** Polyester og polyamid
- **Stive komponenter:** Aluminiumsskinne

Anvendelse

1. Placer tommelfingeren i skinnen.
2. Sørg for, at aluminiumsskinne ligger korrekt langs tommelfingeren.
3. Fastgør skinnen omkring håndleddet med velcrolukningen.
4. Justér lukningen, så skinnen sidder stabilt og komfortabelt.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Ledirritation i tommelfingeren
- De Quervains syndrom (seneskedehindebetændelse i tommelfingeren)
- Skader på ledbånd i tommelfingeren

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.
- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
- Ubehag

- Unormal hævelse
- Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
- Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



Importør og Distributør:

Inter Line Import/Export ApS

Stillingvej 107, 8471 Sabro

Danmark

+45 23663330

Info@inter-line.nu