

## **Wingmed W339 – Fingerskinne**

### **Beskrivelse af enheden**

Dette produkt er en type ortose, der gør det muligt at immobilisere fingrene. Enheden er udelukkende designet til de aktuelle indikationer og korrekt kropsmåling.

### **Enhedens sammensætning**

**Tekstilkomponenter:** Polyamid-polyester

**Stive komponenter:** Aluminium

### **Anvendelse af enheden**

Efter at have åbnet velcrobåndene på enheden, placeres fingeren i skinnen og velcrobåndene lukkes for at fastgøre den.

### **Indikationer**

- Fingerbrud
- Sene- og nerveskader
- Forstuvninger og skader på fingrene

### **Kontraindikationer**

- Brug ikke enheden i tilfælde, hvor diagnosen er usikker.
- Skinnen må ikke placeres i direkte kontakt med beskadiget hud.
- Brug ikke produktet ved allergi over for nogen af komponenterne.
- Personer med tidligere eller aktuelle venøse eller lymfatiske lidelser bør ikke bruge produktet.

### **Vigtige oplysninger og advarsler**

- Kontrollér enhedens integritet før hver brug.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget.
- Det anbefales, at brugen sker under opsyn af en sundhedsprofessionel.
- Brug ikke enheden, mens du kører bil.
- Enheden er beregnet til én patient og må ikke anvendes af andre.
- Ved ubehag, smerter, unormal hævelse eller ændring i farven på fingeren skal enheden fjernes og en sundhedsprofessionel kontaktes.
- Den daglige brug og behandlingens varighed skal fastsættes af en sundhedsprofessionel.
- Brug ikke enheden sammen med visse hudprodukter (cremer, salver, olier, geler osv.).

### **Vedligeholdelse og opbevaring**

- Vaskes i lunkent vand i hånden med et mildt rengøringsmiddel.

- For at bevare velcrolukningernes klæbeevne på lang sigt skal de lukkes før vask.
- Tørres fladt i fri luft og må ikke udsættes for varme (sol, radiator osv.).
- Må ikke renses kemisk.
- Opbevar enheden ren i originalæskan, når den ikke er i brug.



**Importør og Distributør:**

Inter Line Import/Export ApS

Stillingvej 107, 8471 Sabro

Danmark

+45 23663330

Info@inter-line.nu