

## **Wingmed W348 – Dobbelt Fingerbandage**

### **Produktbeskrivelse**

- Denne ortose er designet til at immobilisere fingrene.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer.
- Ortosen skal tilpasses korrekt til patientens størrelse.

### **Materialer**

- Tekstil: Polyamid og polyester
- Stive komponenter: Integrerede støtteelementer

### **Anvendelse**

1. Åbn velcrobåndene på ortosen.
2. Placer fingrene korrekt i ortosen.
3. Luk velcrobåndene, så ortosen sidder stabilt og komfortabelt.

### **Indikationer**

- Skader på fingrene (traumatologi)
- Støtte ved genoptagelse af aktivitet eller sport

### **Kontraindikationer**

#### **Produktet må ikke anvendes:**

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

### **Advarsler og forholdsregler**

- Kontroller altid produktets tilstand før brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet bør ske efter anbefaling fra en sundhedsprofessionel.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.
- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.
- Hvis der opstår smerte, ubehag, hævelse eller ændringer i hudens farve, skal ortosen fjernes, og en sundhedsprofessionel kontaktes.

- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
- Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

### **Rengøring og vedligeholdelse**

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at beskytte deres vedhæftning.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

### **Opbevaring**

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



#### **Importør og Distributør:**

Inter Line Import/Export ApS  
Stillingvej 107, 8471 Sabro  
Danmark  
+45 23663330  
Info@inter-line.nu