

**Wingmed W354 –
Håndledsskinne –
Med nemt lukkesystem**

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at immobilisere og stabilisere håndleddet.
- Skinnen har en anatomisk formet aluminiumsskinne, der holder håndleddet i en neutral position.
- Produktet er fremstillet af læder og åndbart tekstilmateriale for øget komfort under brug.
- Det praktiske lukkesystem gør det nemt at justere ortosen og opnå korrekt støtte.

Materialer

- **Tekstil:** Læder og åndbart tekstil (polyester / polyamid)
- **Støtteelementer:** Anatomisk formet aluminiumsskinne

Anvendelse

1. Før hånden ind i håndledsbandagen.
2. Sørg for, at håndleddet er placeret korrekt i bandagen.
3. Justér velcrolukningen, så bandagen sidder fast og komfortabelt omkring håndleddet.
4. Anvend bandagen under daglige aktiviteter efter behov.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Håndledsforstuvninger
- Overbelastning af håndleddet
- Mindre håndledsskader eller traumer
- Rehabilitering efter skade eller immobilisering

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.
- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.

**Importør og Distributør:**

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu