

Wingmed W419 – Magnetisk Korset

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at støtte og stabilisere lænden og taljeområdet.
- Produktet kan hjælpe med at reducere smerter i lænden ved at give kompression og støtte til rygmuskulaturen.
- Korsettet indeholder magnetiske elementer på rygdelen og stabiliserende bånd, som bidrager til støtte i lændeområdet.
- Produktet har en højde på 16 cm og giver stabilisering via støttebånd bagpå.

Materialer

- **Tekstil:** Polyester, polyamid og elasthan
- **Støtteelementer:** Integrerede magnetiske elementer i rygdelen

Anvendelse

1. Placer korsettet omkring taljen.
2. Fastgør bæltet foran på maven ved hjælp af velcrolukningen.
3. Justér støttebåndene, så korsettet sidder stabilt og komfortabelt omkring lænden.
4. Sørg for, at korsettet giver støtte uden at stramme for meget.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Akutte lændesmerter
- Kroniske lændesmerter
- Forstrækninger eller belastning i lændemuskulaturen
- Forstuvning og overbelastning af lænden

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.
- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
- Ubehag
- Unormal hævelse
- Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
- Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



Importør og Distributør:

Inter Line Import/Export ApS
 Stillingvej 107, 8471 Sabro
 Danmark
 +45 23663330
 Info@inter-line.nu