

Wingmed W427 – Brokbælte - Dobbeltsidet

Produktbeskrivelse

- Dette brokbælte er designet til at støtte ved lyskebrok.
- Produktet hjælper med at lindre smerte og reducere trykket i lyskeområdet.
- Bæltet er beregnet til **dobbeltsidig støtte ved lyskebrok**.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer og i korrekt størrelse.

Materialer

- **Tekstil:** Polyamid, elastan og polyester
- **Stive komponenter:** EVA

Anvendelse

1. Placer bæltet omkring taljen.
2. Placer de to støttepuder over hvert lyskebrok.
3. Fastgør bæltet omkring taljen med velcrobåndene.
4. Før de to stropper mellem benene og fastgør dem bagpå bæltet.
5. Justér spændingen, så bæltet sidder fast og komfortabelt uden at stramme for meget.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Dobbeltsidet lyskebrok
- Støtte før operation for lyskebrok
- Midlertidig støtte efter operation efter lægens anbefaling

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.

- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændring i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent i den originale emballage, når det ikke er i brug.



Importør og Distributør:

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu