

Wingmed W429 – Neopren Holdningsstøtte

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at støtte ryggen og forbedre kropsholdningen.
- Produktet hjælper med at reducere belastning og smerter i ryg og skuldre ved at korrigere kropsholdningen.
- Neoprenmaterialet hjælper med at holde på kropsvarmen og kan stimulere blodcirkulationen i området.

Materialer

- **Tekstil:** Neopren, polyamid og polyester
- **Støtteelementer:** Elastiske stropper til holdningskorrektion

Anvendelse

1. Tag holdningsstøtten på ved at føre armene gennem skulderstropperne.
2. Placer støtten på øvre del af ryggen.
3. Justér stropperne, så skuldrene trækkes let tilbage.
4. Fastgør velcrolukningen foran på kroppen for optimal støtte.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Dårlig kropsholdning
- Spændinger i skuldre og øvre ryg
- Svaghed i rygmuskulaturen
- Rehabilitering efter mindre ryg- eller skulderskader

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.

- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændring i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent i den originale emballage, når det ikke er i brug.

**Importør og Distributør:**

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu