

**Wingmed W432 –
Lomba Korset 26cm**

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at lindre smerter i lændeområdet.
- Produktet kan hjælpe med at reducere spændinger i musklerne og smerter i dette område.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer og i korrekt størrelse.

Materialer

- **Tekstil:** Polyamid, elastan og polyester
- **Stive komponenter:** Stål og polypropylen

Anvendelse

1. Placer bæltet omkring taljen.
2. Luk bæltet omkring maven ved hjælp af velcrobåndene.
3. Juster korsettet ved hjælp af stropperne på siderne.
4. Fastgør stropperne foran på bæltet for at opnå optimal støtte.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Diskusprolaps og degenerative forandringer i rygsøjlen
- Iskias og lændesmerter (lumbago)
- Akutte eller længerevarende lændesmerter
- Rehabilitering efter operation

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- hvis diagnosen ikke er fastlagt
- direkte på beskadiget eller irriteret hud
- ved kendt allergi over for produktets materialer
- ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.

- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.
- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



Importør og Distributør:

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu