

**Wingmed W506 –
Patella & Ligamentknæstøtte**

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at beskytte og støtte ledbåndene i knæleddet.
- Produktet bidrager til stabilisering af knæet og kan hjælpe med at reducere smerter.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer og i korrekt størrelse.

Materialer

- **Tekstil:** Polyester, polyamid og elastan
- **Stive komponenter:** Silikone og stål

Anvendelse

1. Tag ortosen på ved at føre foden gennem åbningen.
2. Placer knæskallen (patella) i midten af åbningen.
3. Sørg for, at etiketten vender opad på knæet.
4. Justér ortosen, så den sidder stabilt og komfortabelt.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Øget væske i knæleddet (intraartikulær væskeophobning)
- Skader på de laterale ledbånd og knæ smerter
- Rehabilitering efter kirurgisk indgreb

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.

- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



Importør og Distributør:

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu