

**Wingmed W604 –
Malleo Ankelstøtte**

Produktbeskrivelse

- Denne ortose er designet til at støtte og stabilisere anklen.
- Produktet hjælper med at reducere smerter og hævelse ved at give kompression omkring anklen.
- Ortosen indeholder silikonepuder omkring ankelknoglerne (malleolerne), som giver ekstra støtte og stabilitet.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer og i korrekt størrelse.

Materialer

- **Tekstil:** Elastisk og vævet tekstilmateriale (polyamid / polyester / elasthan)
- **Stive komponenter:** Silikonepuder omkring anklen

Anvendelse

1. Før foden ind i ankelstøtten.
2. Sørg for, at silikonepuderne er placeret korrekt omkring ankelknoglerne.
3. Justér ankelstøtten, så den sidder tæt og komfortabelt.
4. Anvend støtten i sko under daglige aktiviteter eller sport.

Indikationer

Produktet kan anvendes ved:

- Ankelforstuvninger
- Skader på anklens ledbånd
- Rehabilitering efter kirurgisk indgreb
- Rehabilitering efter gipsbehandling
- Kompression ved hævelse (ødem) efter skade

Kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

Advarsler og forholdsregler

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.

- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:

- Smerte
 - Ubehag
 - Unormal hævelse
 - Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
 - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

Rengøring og vedligeholdelse

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

Opbevaring

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



Importør og Distributør:

Inter Line Import/Export ApS
Stillingvej 107, 8471 Sabro
Danmark
+45 23663330
Info@inter-line.nu