

**Wingmed W654 –  
Ankelstøtte -  
Med nemt lukkesystem**

**Produktbeskrivelse**

- Denne ortose er designet til at stabilisere anklen.
- Produktet bidrager til at støtte anklen og reducere belastning ved skader.
- Produktet må kun anvendes til de angivne indikationer og i korrekt størrelse.

**Materialer**

- **Tekstil:** Polyester, polyamid og PU-skum
- **Stive komponenter:** Stål og polypropylen

**Anvendelse**

1. Før foden ind i ankelortosen.
2. Sørg for, at hælen er korrekt placeret i åbningen bag på produktet.
3. Luk ortosen ved hjælp af lukkesystemet ved at dreje spændehjulet med uret, indtil den ønskede fasthed opnås.
4. Fastgør derefter stropperne på siderne af anklen ved at krydse dem.
5. For at løsne spændehjulet trækkes det ud, indtil det klikker.

**Indikationer**

Produktet kan anvendes ved:

- Beskyttelse ved sportsskader
- Kompression og støtte efter forstuvninger og andre ankelskader
- Ledbåndsskader før og efter operation
- Konservativ behandling af skader på akillesenen
- Stabilisering af anklen

**Kontraindikationer**

Produktet må ikke anvendes:

- Hvis diagnosen ikke er fastlagt
- Direkte på beskadiget eller irriteret hud
- Ved kendt allergi over for produktets materialer
- Ved tidligere eller eksisterende venøse eller lymfatiske lidelser

**Advarsler og forholdsregler**

- Kontroller produktets tilstand før hver brug.
- Produktet må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
- Brug af produktet under vejledning eller opsyn af en sundhedsprofessionel anbefales.
- Produktet må ikke anvendes under kørsel af køretøj.

- Produktet er beregnet til personlig brug og må ikke deles med andre.

#### **Fjern ortosen og kontakt en sundhedsprofessionel ved:**

- Smerte
  - Ubehag
  - Unormal hævelse
  - Ændringer i hudens farve
- Varighed og hyppighed af brug bør fastsættes af en sundhedsprofessionel.
  - Produktet bør ikke anvendes på hud, hvor der er påført cremer, salver, olier eller geler.

#### **Rengøring og vedligeholdelse**

- Vask produktet i hånden i lunkent vand med mildt vaskemiddel.
- Luk velcrobåndene før vask for at bevare deres funktion.
- Tør produktet fladt ved lufttørring.
- Undgå direkte varme under tørring (sollys, radiator m.m.).
- Produktet må ikke kemisk renses.

#### **Opbevaring**

- Opbevar produktet rent og tørt i den originale emballage, når det ikke er i brug.



#### **Importør og Distributør:**

Inter Line Import/Export ApS  
Stillingvej 107, 8471 Sabro  
Danmark  
+45 23663330  
Info@inter-line.nu